

Coffret métallique pour défibrillateur

A/ Installation du coffret au mur

Percez deux trous au mur en ayant pris soins auparavant de repérer les endroits auxquels il faut percer en présentant le coffret.

Attention, les vis ne sont pas fournies avec le coffret.

B - Installation de la pile

1/ Insérez la clé fournie dans la serrure « marche/arrêt » et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « 12heures », pour garantir que l'alarme est bien désamorcée.


2/ Ouvrez le coffret métallique et repérez le boîtier Alarme/Pile.

3/ Saisissez-vous des côté du boîtier Alarme/Pile et tirer le capot. La partie inférieure du boîtier restera fixée au coffret.

4/ Retournez le couvercle et repérez le logement et le connecteur pour la pile alcaline de 9V – (S'il s'agit d'un remplacement de pile, déconnectez-la des connecteurs et éliminez-la de manière adéquate).

5/ Connectez une pile alcaline 9V neuve au connecteur, placez la pile dans le logement prévu.et replacer le couvercle sur la partie inférieure du boîtier Alarme/Pile.

6/ refermez la porte du coffret et réenclenchez l'alarme en utilisant la clé fournie (Tournez la clé jusqu'à la position « 3 heures » pour rendre l'alarme opérationnelle).

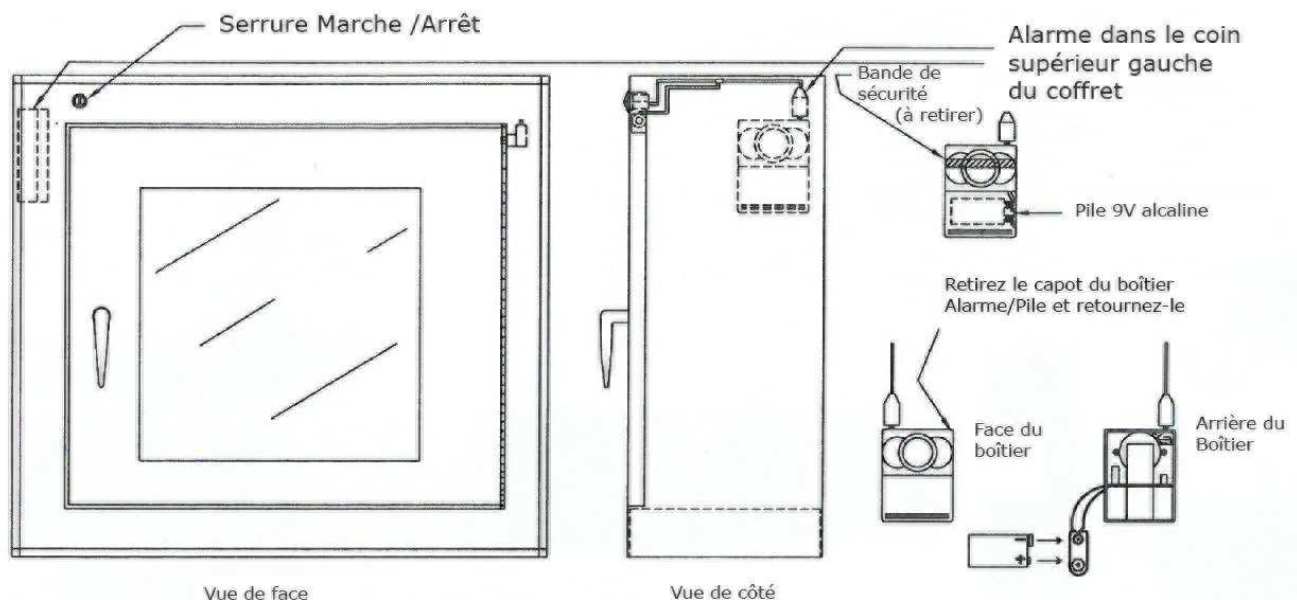

NOTE : Retirez l'adhésif prévu pour le transport sur la face du boîtier Alarme/Pile et éliminez-le.

C – Mise en route de l'alarme

1/ Installez la batterie et le capot du boîtier Alarme/Pile comme indiqué précédemment.

2/ Placez le défibrillateur dans le coffret. Refermez la porte.

3/ Tournez la clé jusqu'en position « Marche » (« 3 heures ») pour endencher l'alarme.

4/ En cas d'ouverture de la porte du coffret l'alarme sonnera pendant 30 secondes et le voyant lumineux clignotera. Même si la porte est refermée, le voyant continuera à clignoter et l'alarme émettra un son toutes les 10 secondes.

5/ Les sons et clignotements continueront jusqu'à ce que quelqu'un tourne la clé en position « Arrêt » (12 heures)

6/ pour réamorcer l'alarme :

- Fermez le coffret
- Laissez la position « arrêt » pendant au moins 3 secondes avant de tourner la clé en position « marche », ce qui réenclenchera l'alarme.

NOTE : l'indicateur « Pile faible » émettra un son toutes les 10 secondes lorsque la pile atteindra un niveau de charge sous le niveau opérationnel. Nous recommandons un changement annuel de la pile. Les piles Alkaline Energizer Titanium sont recommandées pour une plus longue opérationnalité.

PHILIPS

